

BRUKSANVISNING (IFU)

BioRePeelCl3® – Profesjonelt peelingsprodukt

Internasjonalt patentert produkt
Medisinsk utstyr
Kun for profesjonell bruk
Kun for utvortes (topikal) bruk
Tiltenkt medisinsk bruk

1. Produktbeskrivelse

BioRePeelCl3® er et profesjonelt peelingsprodukt utviklet for bruk av kvalifisert fagpersonell innen medisinsk-estetisk og estetisk praksis. Produktet er basert på en tofase-formel som kombinerer syrer, aminosyrer og vitaminer, og er utviklet for bruk i profesjonelle hudbehandlinger.

Produktet er utviklet og produsert i Italia basert på italiensk forskning og innovasjon.

2. Sammensetning (virkestoffer)

Produktet er basert på følgende aktive ingredienser:

- Trikloreddiksyre (Trichloroacetic Acid)
 - Laktobionsyre
 - Salisylsyre
 - Vinsyre (Tartaric Acid)
 - Sitronsyre (Citric Acid)
 - Arginin
 - Gamma-aminosmørsyre (GABA)
 - Ascorbyl Glucoside
 - Glycin
 - Prolin
 - Hydroksyprolin
 - Riboflavin
-

3. Bruksområde

Produktet er beregnet for profesjonell behandling av følgende områder:

- Ansikt
- Hals
- Dekolleté

Produktet kan også benyttes på utvalgte kroppsområder basert på faglig vurdering.



www.bestconnection.no

4. Brukergruppe

Produktet skal **kun brukes av kvalifisert fagpersonell**, herunder:

- autorisert helsepersonell
 - profesjonelle behandlere med dokumentert opplæring innen estetiske hudbehandlinger
-

5. Bruksanvisning – produsentens anbefalte protokoll

5.1 Forberedelse

1. Rens behandlingsområdet grundig med egnet renseprodukt (for eksempel aceton eller annen egnet avfettingsløsning).
 2. Rist ampullen godt i noen sekunder til produktet får en midlertidig grønn farge, som indikerer at løsningen er homogen.
-

5.2 Påføring

3. Trekk opp ønsket mengde produkt med sprøyte **uten å fjerne butylproppen**.
 4. Påfør produktet med nitrilhansker og fordel jevnt til det er fullstendig absorbert i huden.
-

5.3 Virketid

La produktet virke i henhold til behandlingsområde:

- **Ansikt, hals og dekolleté:** 3–5 minutter
- **Kropp:** 5–10 minutter

Virketiden vurderes individuelt basert på hudtype og faglig skjønn.

5.4 Avslutning av behandling

5. Fjern eventuelle produktrester ved å rense området med kompress fuktet med vann.
-

6. Veiledende mengder

6.1 Ansikt, hals og dekolleté

Område	Anbefalt mengde
Ansikt	1,5–2,0 ml
Hals	1,0–1,5 ml
Dekolleté	2,0–2,5 ml

6.2 Kropp (veiledende)

Område	Anbefalt mengde
Hender	2 ml per hånd
Albuer	0,5–1 ml
Knær	1 ml
Sete	4 ml
Føtter	1,5 ml per fot
Andre områder	ca. 1 ml per dm ²

7. Behandlingsintervall

- **Ansikt, hals og dekolleté:**
Hver 7.–12. dag, totalt 4–6 behandlinger
- **Kropp:**
Hver 10.–15. dag, totalt 4–6 behandlinger

Behandlingsintervall fastsettes av behandler basert på faglig vurdering.

8. Advarsler og forsiktighetsregler

- Kun for utvortes bruk
- Skal ikke injiseres
- Unngå kontakt med øyne og slimhinner
- Skal ikke brukes på skadet eller irritert hud
- Avbryt behandlingen ved uønskede reaksjoner
- Produktet skal ikke brukes av uautoriserte personer



9. Oppbevaring

- Oppbevares ved temperatur **maksimalt 25 °C**
 - Beskyttes mot direkte sollys og varme
 - Oppbevares utilgjengelig for barn
-

10. Holdbarhet og identifikasjon

- Produksjonsdato: **09/2025**
 - Utløpsdato: **09/2028**
 - Batch-/lotnummer: **256251**
 - Produktkode: **052536180000**
-

11. Emballasje og materialer

- Flaske: GL 70 – Glass
 - Kapsel: ALU 41 – Aluminium
 - Butylpropp
 - Sleeve / ytteremballasje
 - Eske
 - Bruksanvisning (leaflet)
-

12. Avfallshåndtering

Sorteres i henhold til lokale retningslinjer:

- Glass → Glassavfall
- Aluminium → Metallavfall
- Plast → Plastavfall
- Papir → Papiravfall
- Øvrig → Restavfall

Kontroller lokale bestemmelser for avfallshåndtering.

13. Produsent

CMed Aesthetics S.p.A.

Via Panfilo Castaldi 4

56121 Pisa, Italia

www.cmedaesthetics.com

Made in Italy

Italiensk forskning og innovasjon

Denne bruksanvisningen skal følge produktet ved omsetning i Norge.



www.bestconnection.no