

JALUPRO® HMW

Advarsel: Ikke bruk til andre formål enn de som er angitt i denne pakningsvedlegget.

Bruksområde:

JALUPRO® HMW er et medisinsk utstyr i henhold til EU-direktiv 93/42 MDD. Det brukes til behandling av huddefekter og depresjoner forårsaket av rynker og arr. Kan kombineres med fysiske eller kjemiske behandlinger som peeling, laserterapi og dermabrasjon.

Beskrivelse:

JALUPRO® HMW er en steril, injiserbar og reabsorberbar løsning som fungerer som en filler. Den gjenoppretter hudens elastisitet og volum midlertidig ved å fremme vekst av bløtvev.

Virkning:

- Smører vev og reduserer synligheten av hudfolder.
- Støtter fysiske eller kjemiske behandlinger som peeling, laserterapi og dermabrasjon.

Sammensetning:

Vann til injeksjon, natriumhyaluronat, glysin, L-prolin, L-leucin, L-lysin HCL.

Innhold i pakken:

- 1 engangssprøyte med steril natriumhyaluronatgel.
- 1 engangsflaske med steril aminosyreløsning.
- **OBS:** Pakken inneholder ikke nåler.

Bruksanvisning:

1. Bruk en steril Luer-Lock-nål.
2. Injiser gelen fra sprøyten (A) inn i flasken (B) og rist til løsningen er homogen.
3. Aspirer løsningen tilbake i sprøyten og bytt nål før injeksjon.
4. Administrer intradermalt i henhold til anbefalte teknikker.

Kontraindikasjoner:

- Ikke bruk ved kjent allergi mot innholdsstoffene.
- Ikke injiser i tilfelle hudirritasjon eller pågående betennelse.
- Ikke bruk hos pasienter med koagulasjonsforstyrrelser.

Advarsler:

- Ikke bruk hvis pakningen er åpnet eller skadet.
- Ikke bruk etter utløpsdato.



- Må ikke resteriliseres eller fryses.
- Sprøyten og flaskens innhold skal brukes sammen.
- Kun til engangsbruk – gjenbruk kan føre til infeksjoner.

Pasientinformasjon:

- Små lokale reaksjoner som hevelse eller rødhet kan forekomme og går normalt over innen to dager.
- Unngå varme kilder til hevelsen har gått ned.
- Ved bivirkninger, kontakt lege.

Dosering og administrasjon:

- Dosen bestemmes av legen.
- Behandlingen bør ikke gjentas før tre dager etter forrige injeksjon.
- Vanlig regime: 4–6 behandlinger ukentlig, eller etter legens vurdering.

Avfallshåndtering:

- Må ikke kastes i naturen.
- Ubrukt produkt skal kastes som sykehusavfall.

Lagring:

- Oppbevares mellom 5° og 25°C.
- Må ikke fryses.
- Beskyttes mot fuktighet og varmekilder.

Produsent:

PROFESSIONAL DERMA SA, Riva A. Caccia 1/d, 6900 Lugano, Sveits.

	CE-merket og identifikasjon nummer av produktet		Sluttproduktinformasjon		Oppbevares utenfor sollys		Nål / Nålinformasjon
	Produsert av		Ikke gjenbrukbar		Oppbevares i følgende temperatur		Sterilisert med EO-gass (nål)
	Ikke bruk produktet hvis pakken er skadet		Bruk innen		Forsiktig		Ikke re-steriliser nålen
	Autorisert representant i EU		Sterilisert ved bruk av damp		Holdes tørr		Ikke bruk nålen igjen
	Se bruksanvisningen		Produktnummer				CE-merket og identifikasjonsnummer av produktet (nål)
	Ikke steriliser og bruk på nytt		Viktig, se instruksjonene før bruk				